



# HYGIËNEPROTOCOL

## CONTRA-INDICATIE VOOR GEBRUIK


- Bij wondjes aan hoofd of hals waarbij de huid open is.
- Ontstekingen in het gezicht.
- Eczeem in het gezicht.

## VOOR GEBRUIK

1. Reinig en desinfecteer uw handen.
2. Als u gebruik wilt maken van oordoppen voor geluid, zorg ervoor dat u gebruik maakt van eigen oordoppen/koptelefoon.
3. Plaats het VR-super mask<sup>3</sup> over uw hoofd.
4. Plaats de isolatiemuts of het haarnetje over uw hoofd.
5. Plak uw eigen gezichtskussen<sup>1</sup> met het klittenband op het gezichtsmasker<sup>2</sup>.
6. Zet de VR-bril<sup>5</sup> op en volg de VR-instructies.

## NA GEBRUIK

1. Verwijder uw gezichtskussen<sup>1</sup>, VR-super mask<sup>3</sup> en haarnetje.
2. Gooi VR-super mask<sup>3</sup> en isolatiemuts/haarnetje weg.
3. Verwijder het gezichtsmasker<sup>2</sup> van de Oculus Go bril<sup>5</sup>.
4. Neem het gezichtskussen<sup>1</sup>, gezichtsmasker<sup>2</sup>, de hoofdbanden<sup>4</sup>, de VR-bril<sup>5</sup> en de controller<sup>6</sup> af met met Indicin Oxy Wipes. Belangrijk: maak de lenzen niet schoon met de doekjes! Neem dit af met een droge doek.
5. Berg de VR-bril<sup>5</sup> en toebehoren<sup>2,4,5,6</sup> op in de toegewezen plek.
6. Desinfecteer uw handen.

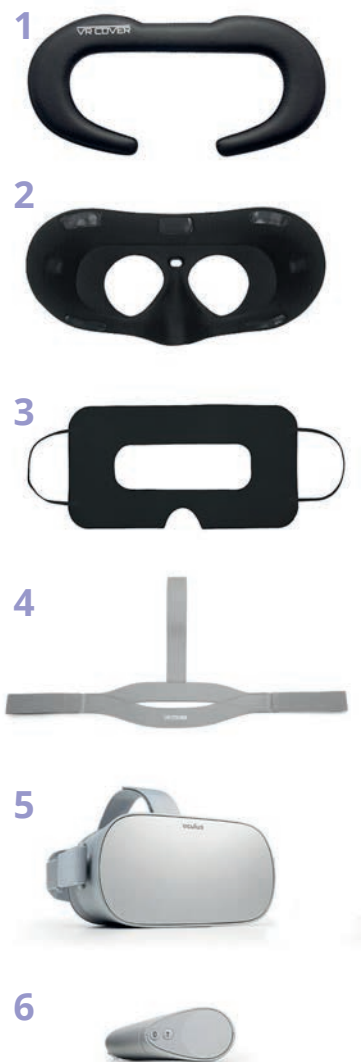

VRELAX  
WEG STRESS.