

# De nieuwe VRelax update is er!

De nieuwe VRelax app is beschikbaar! Volg de stappen op de volgende pagina om de app eenvoudig te downloaden in een paar minuten. Upgrade nu gelijk, zodat je kan genieten van de nieuwe features en prachtige nieuwe werelden.

## **Nieuwe login gegevens**

De afgelopen weken hebben we de bij ons bekende contactpersoon uitgenodigd om een account aan te maken op ons platform. Dit is nodig om de nieuwe apps te kunnen gebruiken. Heb je nog geen account aangemaakt? Doe dit dan alsnog.

## **Grip meekijk-app**

Ga op de tablet naar de store en update de VRelax GRIP-app. Je kunt hierop inloggen met je nieuwe account. De GRIP app detecteert nu automatisch VRelax brillen als sessie/gebruiker in zijn omgeving die actief zijn. Selecteer deze en je kunt direct meekijken. Let op dat je dit gebruikt op een stabiel WiFi netwerk met minimaal 15MBIT download snelheid.

Deze VRelax update biedt nieuwe mogelijkheden en prachtige nieuwe werelden voor optimale ontspanning! Dompel jezelf onder in tropische oceanen vol vissen, koraal en dolfijnen!

- **Meet effecten met biofeedback (HRV)**
- **Vernieuwde en stabiele GRIP-app**
- **Online dashboard + contentbeheer**
- **Betere beveiliging en databescherming**
- **Veel extra content**

## Geen stress!

Het doorlopen van deze stappen kost je een paar minuten. Het downloaden van de video's gaat vanzelf. Kan jij lekker ontspannen!



VRELAX

# VRelax & PICO update handleiding


## Stap 1 Controleer Kiosk mode

Dankzij Kiosk mode kom je automatisch in de VRelax app als de bril opstart. Gebruikers kunnen hierdoor niet zelf de update uitvoeren. Controleer of jouw bril in Kiosk mode staat door eenmaal op de PICO knop te drukken.

Staat jouw bril in KIOSK-mode dan kun je hier ons nieuwe instructieboekje downloaden om binnen een paar stappen de update te downloaden en daarna de VR bril weer in KIOSK-mode te zetten.

## Verbinden met internet

Als de VR-bril niet is verbonden met internet, volg dan deze stappen

1. In het hoofdmenu van de bril (dus niet VRelax) beweeg je de stip  met je hoofd naar het WIFI icoon links onderin de menubalk. Druk met je vinger op de selectieknop (rechterzijde VR-bril).
2. Selecteer op dezelfde manier je WIFI netwerk en voer de login gegevens in om verbinding te maken.

## PICO software updaten

3. Klik op instellingen onderin de menubalk en klik op "Check PUI Update". Als er een update beschikbaar is klik dan op "Upgrade now". Lees anders verder bij VRelax 3.0 downloaden.
4. Als de update volledig is opgehaald klik je op "Restart for update". Er komt nu een pop-up in beeld, klik op "Upgrade".

De VR-bril zal na installatie opnieuw opstarten.

## VRelax 3.0 downloaden

5. In het hoofdmenu van de bril (dus niet VRelax) klik je op App Store onderin de menubalk.
6. Klik op purchased links in beeld en update VRelax gelijk. Als je nog geen PICO account hebt kan je deze hier eenvoudig aanmaken.

## VRelax activeren

Vraag de beheerder van de VR-bril om de nieuwe VRelax login gegevens en houd ze bij de hand.

7. Bij het opstarten van de VRelax app word gevraagd om online in te loggen. Ga naar de website die de bril noemt en log in met de nieuwe gegevens.
8. In het VRelax menu krijg je een melding over de content. Klik op "alles downloaden".

Tip: Tijdens het downloaden van de video's, leg je de bril aan de oplader met de lenzen omhoog. Leg iets op de sensor tussen de lenzen (het kleine vierkantje) zodat het downloaden verder gaat terwijl je weg bent.

## Kom je er niet uit?

Ga dan naar [www.vrelax.com/support](http://www.vrelax.com/support) of bel naar 050 211 0142

Wij helpen je zo weer op weg!

